


咬合採得専用レジン バイトレジン

BITE RESIN

BITE REGISTRATION MATERIAL

特
POINT
長

- 1, 低刺激、無発熱で硬化がスピーディ。
- 2, 収縮が少なく、咬合の再現性に優れる。
- 3, 破損の恐れがなく、保存性に優れる。
- 4, 軟質のため、アンダーカット部にも使用できる。
- 5, シリンジ法と一塊法の、2通りの使い方ができる。

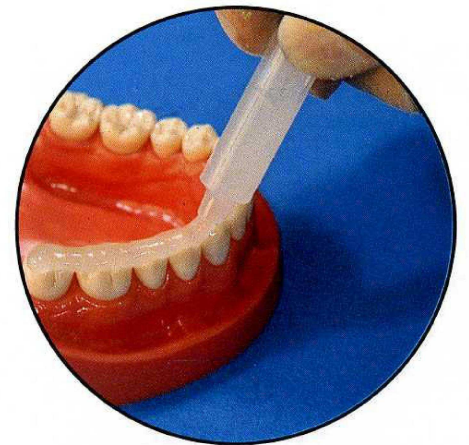

セット内容

粉末	200g	紙練板	} 各1
液	100ml	混和カップ	
シリンジ	2本	計量カップ	
		スポイト	
		スパチュラー	



亀水化学工業株式会社
大阪府寝屋川市豊里町17番16号

咬合採得用レジン印象材

承認番号 20500BZZ00088000
(歯科用レジン系印象材)

バイトレジン

咬合採得では、ワックスを用いると操作は容易ですが変形の恐れがあります。また、ラバー系では高価なわりには浮き上がり現象が見受けられ、ユージノール系では破損の恐れがあるなど、それぞれ材質によって一長一短があげられます。

バイトレジンとは、これら従来品の問題点を解決し、経済的で、扱いやすく寸法精度や寸法安定性に優れた咬合採得専用開発されたレジン系印象材です。

特長

- ①低刺激性、低発熱で硬化がスピーディ。
- ②収縮が少なく、咬合の再現性に優れる。
- ③軟質のため、アンダーカット部にも使用できる。
- ④破損の恐れがなく、保存性に優れる。
- ⑤シリンジ法と一塊法の2通りの使い方ができる。

包装及び色調

粉末 …200g	スポイト…1本
液 …100mL	スパチュラ…1本
混和カップ…1個	シリンジ…2本
紙練板…1冊	計量カップ…1個
色調 …クリアー	

注意事項

- 本材の使用により、発赤などの過敏反応があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 過去にアクリル系モノマーに対し、過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 液または混和物を皮膚に付着させたり、目に入れたりしないように注意すること。皮膚に付着した場合には流水で洗浄すること。万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 液は可燃性のため火気をさけ、使用中は換気をよくすること。揮発性のため使用後は蓋をとったままにしておかないこと。
- 本材は直射日光をさけ、冷暗所に保管すること。
- 本材は説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

使用法

●シリンジ法の場合



1. 計量

標準粉液比は全顎の場合、粉/計量カップ目盛3に対して液/スポイト目盛1.8です。



3. 移しかえ

混和物を紙練板上に移しかえます。



5. 咬合採得

咬合面に盛り上げ、咬合採得をおこないます。混和開始より約3分で硬化します。

6. 余剰分の除去

ハサミで余剰分を切り取り、石膏模型がもどりやすくします。

※ご注意: テンポラリークラウン・ブリッジやレジン歯に付着するおそれがありますので、あらかじめそれらにワセリン等分離剤を塗布しておいてください。

●一塊法の場合

1. 標準粉液比より液量を若干少な目にして、モチ状化を早めます。
2. 手指につかなくなってから、レジン塊を板状に延ばし、咬合面にセットして咬合採得をおこないます。

