




使いやすさを追求した

軟質 レジン仮封材

**POLYSEAL
SOFT**

ポリシールソフト

一塊除去
容易

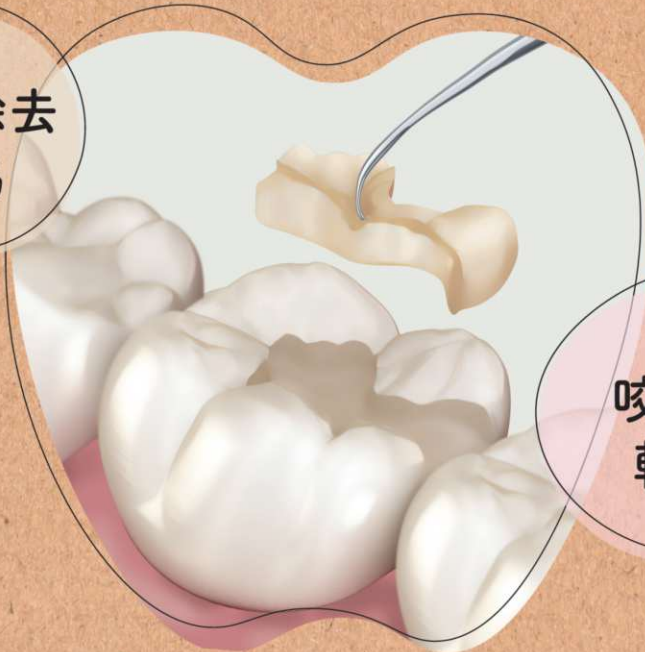

咬合痛
軽減

TEMPORARY CAVITY
SEALING RESIN



亀水化学工業株式会社

〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町17-16
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299

お問い合わせ ☎ **0120-267-720**

<https://kamemizu.co.jp>

E-mail: info@kamemizu.co.jp

Features 特長

レジン臭軽減
※当社比

ソフトタイプ

やわらかな素材で
咬合痛を軽減



適度なやわらかさで
インスツルメントがスムーズに入り
一塊で除去しやすい




色調：アイボリー



ポリシールソフト

ポリシール

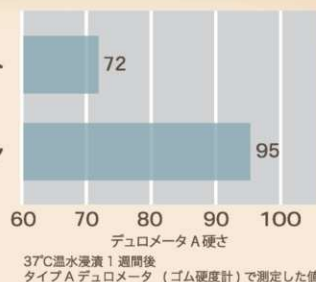


優れた操作性

ベタつきにくく
筆積みしやすい
(筆なじみが良い)



垂れにくく
適度な付形性で
仕上げもスムーズ

低発熱のため
熱収縮が少なく
歯面封鎖性が良い

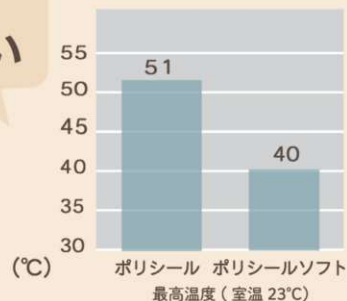

How to use

使用方法【筆積法】

1

窩洞を十分に乾燥させます。



2

筆に液材を染み込ませます。



3

筆先を粉材に入れ、筆先にレジンを玉を作ります。




4

窩洞内に直接充填します。



5

咬合調整をします。

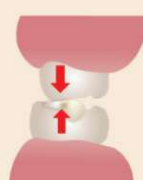

〈使用上の注意〉

冬季に室温が低くなると、液が2相に分離することがあります。
この場合、瓶をよく振るか、瓶ごと温めるようにしてください。上澄み相のみを使用しない限り物性に影響はありません。

除去操作

探針などを刺し、
一塊で除去が可能です。



包装

セット (粉 100g / 液 100mL)
単品粉 (●100g ●250g)
単品液 (●100mL ●300mL)

